


FAUTEUIL DE REPOS XXL – DOSSIER INCLINABLE – ACC. RÉGLABLES

DIMENSIONS FAUTEUIL :

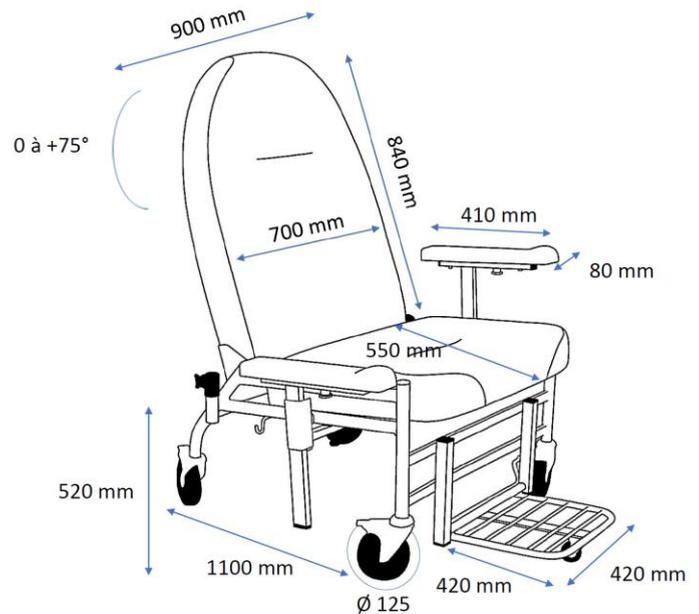


FONCTIONNEMENT :

- **Fauteuil sur roulettes.**
- **Dossier inclinable par vérin à gaz.**
- **Accoudoirs réglables en hauteur.**
- **Repose-pieds rabattable avec une 5^{ème} roulette directionnelle.**

FAUTEUIL DE REPOS XXL – DOSSIER INCLINABLE – ACC. RÉGLABLES

MISES EN GARDE :

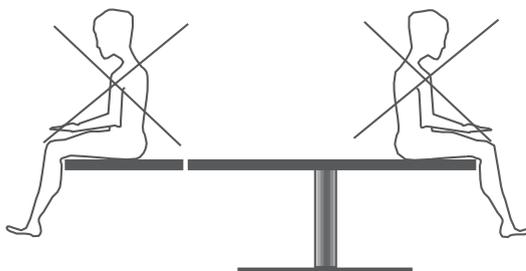

Un fauteuil est fait :

- pour s'asseoir au centre de la sellerie
- pour s'allonger

Un fauteuil n'est pas fait pour :

- pour sauter dessus
- pour s'asseoir aux extrémités (dossier et jambière)
- pour s'asseoir sur les accoudoirs

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

PRÉVENTIONS :

Les tissus enduits de COTTING résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne.

Ils répondent à la norme D60-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. S'ils sont régulièrement entretenus, ils conservent leur souplesse et éclat d'origine.

- Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d'encre qui deviennent vite indélébiles.
- Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
- Éliminer régulièrement les traces de transpiration.
- Éviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

MINIMUM REQUIS :

- Dépoussiérer.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)

PRODUITS A PROSCRIRE :

- Alcool et/ou acétone non dilué.
- Tous solvants et détergents.
- Produits d'entretien abrasifs.
(En cas d'utilisation, ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants)